

IRIDIUM gauzes

MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA PACJENTÓW,
STOSOWANIE
WYROBU MEDYCZNEGO IRIDIUM GAUZES

STOSOWANIE PRZED I PO ZABIEGACH OKULISTYCZNYCH




1

Umyj ręce



2

Otwórz saszetkę
i wyjmij gazik

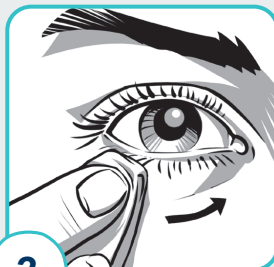

3

Przyłóż gazik do powieki
i delikatnie przecieraj
ją, ruchem od strony
zewnętrznej czyli kącika
oka, do wewnątrz czyli
w kierunku nosa.



4

Zużyty gazik wyrzuć
do kosza



W okołożabiegowej higienie oczu, produkt należy stosować 3 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza^{1,2}.



Podmiot odpowiedzialny: Fidia Pharma Polska sp. z o.o., ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa. Producent wyrobu medycznego IRIDIUM GAUZES: Fidia Farmaceutici S.p.A.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.

IRIDIUM GAUZEŚ MOŻNA STOSOWAĆ JAKO CIEPŁY KOMPRES

Stosowanie lekko podgrzanych gazików Iridium Gauzes jest zalecane w przypadku uporczywych wydzielin ocznych, zaschniętej wydzieliny, niedrożności kanału łzowego, gradówki, jęczmienia³.

Aby podgrzać gazik Iridium Gauzes:


 1	 2	 3	 4	 5	 6
Ogrzej zamkniętą saszetkę w ciepłej wodzie (ok. 40 °C) przez kilka minut.	Umyj ręce	Po kilku minutach (5-6 min.) wyjmij zamkniętą saszetkę ze szklanki	Otwórz saszetkę i wyjmij gazik	Położ gazik na powiekach jak ciepły kompres, na ok. 5-10 min., do wystygnięcia gazika	Po rozgrzaniu powiek, możesz wykonać krótki masaż

Aby uzyskać efekt terapeutyczny używaj Iridium Gauzes co najmniej 2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

IRIDIUM GAUZEŚ MOŻESZ STOSOWAĆ JAKO ZIMNY KOMPRES

W przypadku alergicznych stanów zapalnych zaleca się stosowanie schłodzonych gazików Iridium Gauzes³.

Aby schłodzić gazik Iridium Gauzes:

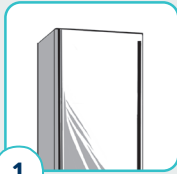 1	 2	 3	 4
Schłódź zamkniętą saszetkę z gazikiem w lodówce przez kilka godzin	Umyj ręce	Otwórz saszetkę i wyjmij gazik	Rozłożony gazik nałóż na powieki i przytrzymaj, do momentu kiedy gazik osiągnie temperaturę ciała i nie będziesz już odczuwać efektu chłodzenia (przez ok. 10 min.)

Aby uzyskać efekt terapeutyczny używaj Iridium Gauzes co najmniej 2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Materiał edukacyjny dla pacjenta

1. D. Sordino et al. Minerva Pediatr 2012; 64 (suppl. 1 to no. 4): 1-5 2. I. Bresesti et al. Minerva Pediatrics 2019 month; 71(0): 000-000 3. Instrukcja stosowania Iridium Gauzes